


HIPPOCAMPE[®]



Hippocampe Schwimmbad

Bedienungs- und Montageanleitung

Einheitsgröße 0002-TS-02-BU

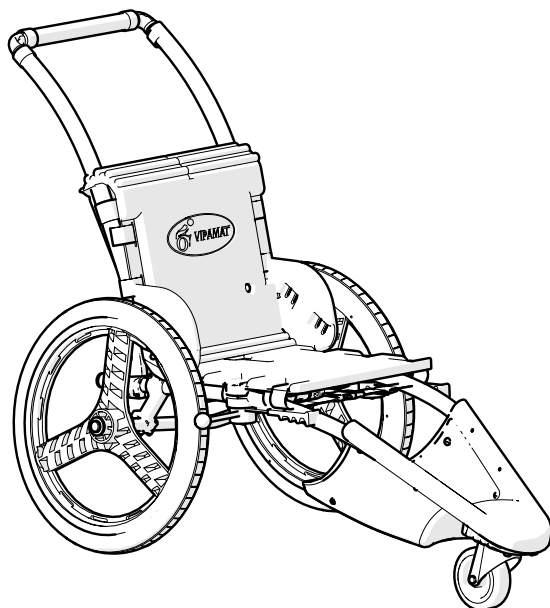

VIPAMAT


3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)
Tél : +33 (0)2 97 86 24 87 - Fax : +33 (0)2 97 86 73 81
www.vipamat.com - contact@vipamat.com

Glückwunsch ! Sie haben gerade das Seepferdchen Schwimmbad von Vipamat erworben. Das Seepferdchen wird Sie in privaten oder öffentlichen Schwimmbädern begleiten. Es ermöglicht Ihnen den Zugang zu allen Wasserbereichen: Umkleidekabinen, Fußbad, Becken und Beckenrand.

Inhaltsverzeichnis

1 Entdecken Sie Ihren Hippocampe Schwimmbad	p2
2 Rechtliche und sicherheitsrelevante Informationen	p4
2.1 Vorsichtsmaßnahmen für Sicherheit und Gebrauch.....	p4
2.2 Konformitätserklärung und Garantiebedingungen.....	p5
2.3 Wartung und Pflege.....	p5
3 Montage des Hippocampe Schwimmbad	p7
3.1 Installation des grauen Radpaars.....	p7
3.2 Installation der Schiebestange.....	p9
3.3 Montage der Sitzfläche.....	p11
3.4 Montage der Option Bauchgurt.....	p13
4 Tipps zur Verwendung	p15
4.1 Verwendung von Feststellbremsen.....	p15

1 Entdecken Sie Ihren Hippocampe Schwimmbad

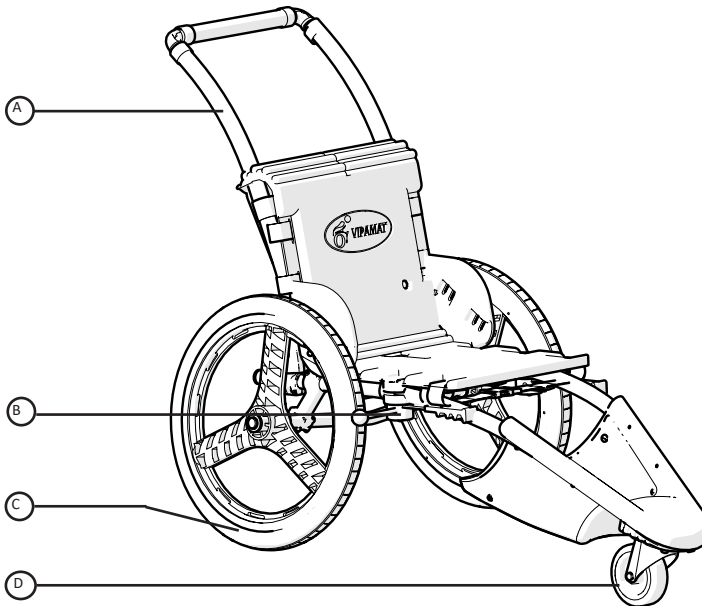

Das Seepferdchen Piscine gibt es in Einheitsgröße und ein Gürtel ist optional erhältlich.

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| A Schiebestange | B Feststellbremsen |
| C Paar graue Räder | D Schwenkbares Vorderrad |

WICHTIG

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

Die strikte Einhaltung der Empfehlungen und Ratschläge in dieser Anleitung ist zwingend erforderlich.

Verfügbare Optionen von Hippocampe Schwimmbad :



Bauchgurt

2 Rechtliche und sicherheitsrelevante Informationen

2.1 Vorsichtsmaßnahmen für Sicherheit und Gebrauch

1. Die strikte Einhaltung der Empfehlungen und Ratschläge in diesem Dokument ist zwingend erforderlich.



Das Seepferdchen Piscine ist ein Sessel für Schwimmbäder, der nur in diesem Rahmen verwendet werden darf. Er ist nicht für den Gebrauch im Freien gedacht.

2 - Dieser Rollstuhl wurde entwickelt, um den Zugang zum Schwimmbecken zu erleichtern.

3. Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung des Rollstuhls, dass die Räder und die Schiebbestänge richtig eingerastet sind, indem Sie auf die einzelnen Clips drücken und prüfen, ob sie aus den Verbindungsstücken herausgezogen sind.

4. Überprüfen Sie, ob alle Schnallen zum Schließen der Sitzfläche eingerastet sind. Die Gurte müssen richtig gespannt und die Schnallen geschlossen sein.

5. Das Seepferdchen kann allein oder in Begleitung benutzt werden.

6. Bei jeder Benutzung des Seepferdchens wird dringend empfohlen, dass eine Begleitperson anwesend ist, die in der Lage ist, den Rollstuhl zu lenken, zu schieben und zu halten.

7. Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Nutzer/in ganz hinten im Sitz sitzen und den Rücken gegen die Rückenlehne drücken.

8. Wie ein Stadtsessel erfordert die Benutzung des Seepferdchens eine gewisse Eingewöhnungszeit. Einige Testmanipulationen können notwendig sein, um das Seepferdchen richtig zu benutzen.

9. Das Seepferdchen sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden, wenn der Benutzer ein Kind ist.

10. Das Seepferdchen ist für eine Einzelperson mit einem Maximalgewicht von 130 kg ausgelegt.

11. Es ist verboten, mit mehr als einer Person in das Seepferdchen zu steigen oder auf dem Seepferdchen zu stehen.

12. Bewegen Sie sich vorsichtig, wenn der Boden schräg ist. Es wird in diesem Fall empfohlen, eine Begleitperson mitzunehmen.

13. Überwinden Sie keine Hindernisse mit einer Höhe von mehr als 20 cm mit dem Seepferdchen überwinden.

14. Mit dem Seepferdchen nicht unter Hindernissen hindurchgehen.

15. Aus Sicherheitsgründen darf das Seepferdchen nicht verwendet werden, wenn der Winkel der Steigung mehr als 7° beträgt.

16. Benutzen Sie beim Transfer die Bremsen, um die Räder zu blockieren.

17. Verändern Sie das Seepferdchen nicht und verwenden Sie niemals andere Komponenten als die von Vipamat gelieferten. Das Seepferdchen darf nicht verwendet werden, wenn eine der Komponenten defekt ist.

18. Die Sitzfläche und die Rückenlehne des Seepferdchens entsprechen der Norm M1. Das Produkt sollte jedoch nicht in der Nähe von Flammen aufbewahrt werden.

19. Um Überhitzung und Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie nicht mit den Händen bremsen, wenn der Rollstuhl auf einem Gefälle steht.

20. Das Seepferdchen sollte nicht benutzt werden, wenn ein Rad platt oder luftleer ist.

21. Wenn Sie Zweifel an der sicheren Nutzung des Seepferdchens haben, stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundenservice von Vipamat unter der Telefonnummer 02 97 86 24 87 oder per E-Mail an contact@vipamat.com.

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch beim Baden :

22. Das Seepferdchen ermöglicht es, bis zur Sitzhöhe ins Wasser zu gehen und zu baden. Es ist nicht dafür gedacht, mit dem Nutzer darauf zu schwimmen. Das Seepferdchen kann nicht als Wasserfahrzeug betrachtet werden.

23. Beim Ein- und Umsteigen ins Wasser sowie während des gesamten Badebetriebs immer von einem Erwachsenen begleitet werden.

24. Das Seepferdchen muss immer in einem bewachten Badebereich verwendet werden.

25. Wenn Sie beim Einstieg ins Wasser und beim Schwimmen einen Gurt verwenden, erfordert dies eine verstärkte Begleitung und Überwachung.

2.2 Konformitätserklärung und Garantiebedingungen

Vipamat en tant que fabricant déclare que l'Hippocampe Piscine dispositif de classe 1 (classification européenne) et de classe 2 (classification USA) et ses accessoires dispositifs médicaux sont conformes au règlement (UE) 2017/745 du parlement européen et du conseil et satisfont aux dispositions applicables de la directive Européenne 93/42/CEE et du livre II du code de la santé publique..

Ce produit est garanti 2 ans "pièces et main d'œuvre" à compter de la date d'achat (facture faisant foi). La garantie consiste à remplacer les pièces défectueuses. Cette garantie n'est pas applicable en cas d'utilisation non-conforme et ne prend pas en compte l'usure des pièces due à l'utilisation du fauteuil. Compte tenu des conditions dans lesquelles l'Hippocampe peut être utilisé, sa durée de vie prévue est de 4 ans après la date de son achat.

Le numéro de série du produit est gravé sur l'axe arrière du châssis. Le numéro de série de l'option ceinture est imprimé sur l'étiquette positionnée sur l'emballage de l'option.

Pour jeter l'Hippocampe à la poubelle, rendez-vous dans une déchetterie et mettez-le dans la bonne catégorie de recyclage.

2.3 Wartung und Pflege





- Le fauteuil Hippocampe Piscine est un fauteuil conçu pour résister à l'eau des piscines. Il est composé de pièces en aluminium, en plastique, et en acier inoxydable issues du secteur du nautisme et du cyclisme.

- L'Hippocampe doit impérativement être rincé abondamment à l'eau douce après chaque utilisation.

-La société Vipamat se dégage de toutes responsabilités quant aux dégradations dues à ces négligences.



L'Hippocampe doit être rincé systématiquement à l'eau douce après chaque utilisation. Sans cette maintenance régulière, les traitements des piscines peuvent endommager la structure.

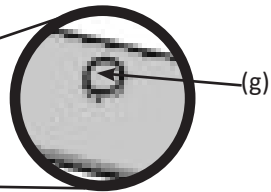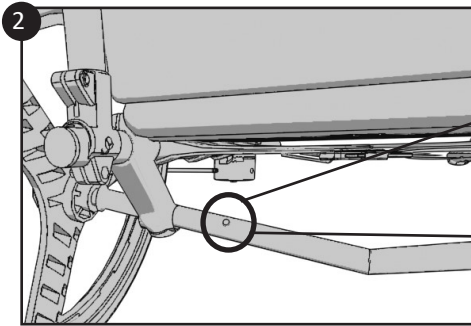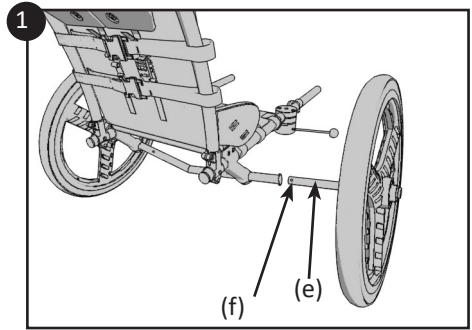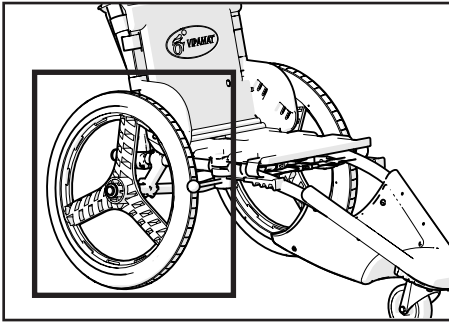

3 Montage des Hippocampe Schwimmbad

3.1 Installation des grauen Radpaars

- 1 Installer les 2 demi-axes dans l'axe du châssis (e)

Presser le clip (f) et insérer complètement le demi-axe de roue avec la roue jusqu'à ce que la roue soit en contact avec l'axe du châssis.




- 2 Tourner le demi-axe de roue pour faire sortir le clip dans le trou de perçage de l'axe du châssis (g).

Vérifications:

- Vérifier le verouillage des demis-axes des roues grises en appuyant sur le clip (f) et en vérifiant sa sortie de l'axe du châssis.



Gonfler les roues à 1,5 bars.


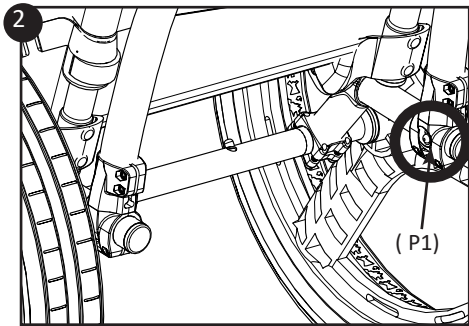
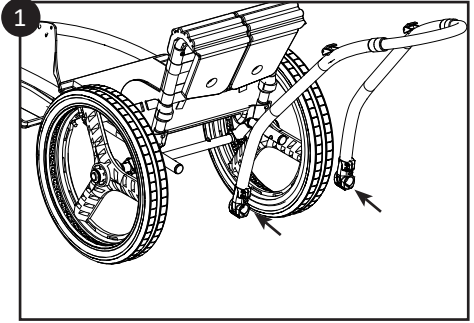
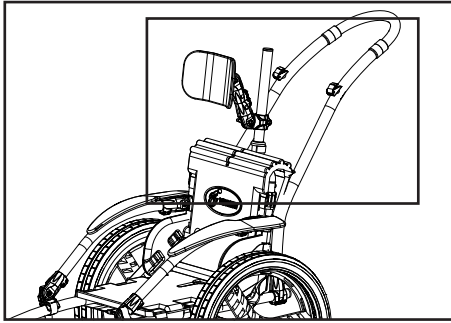


3.2 Installation der Schiebestange

- ❶ Insérer les 2 pièces de jonction de la barre de poussée dans les tubes du châssis jusqu'aux clips.
- ❷ Presser les 2 clips simultanément de façon à pouvoir insérer plus profondément les 2 pièces de jonction de la barre de poussée et faire ressortir les clips dans l'orifice côté intérieur de chaque pièce de jonction. Les 2 clips doivent ressortir des pièces de jonction de la barre de poussée.

Vérifications:

- Vérifier le verrouillage de la barre de poussée en appuyant sur le clip de chaque côté et en vérifiant sa sortie de la pièce de jonction de la barre de poussée (P1).

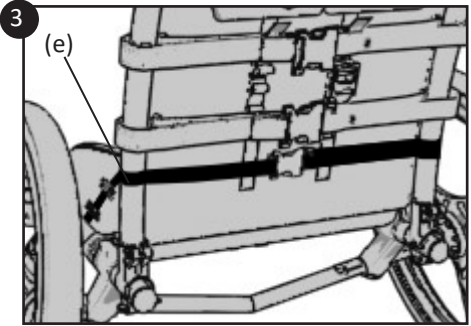
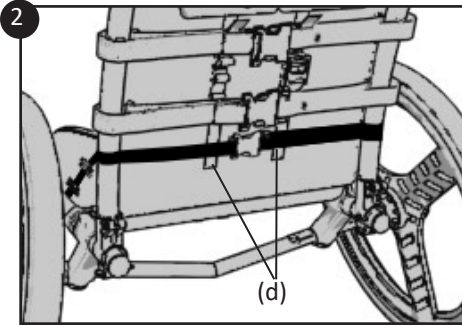
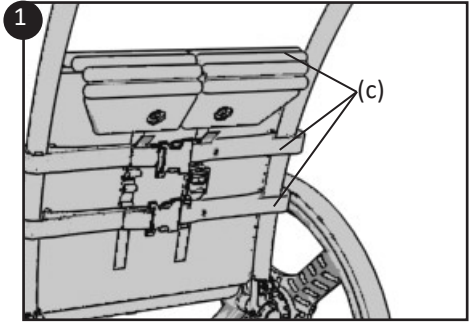
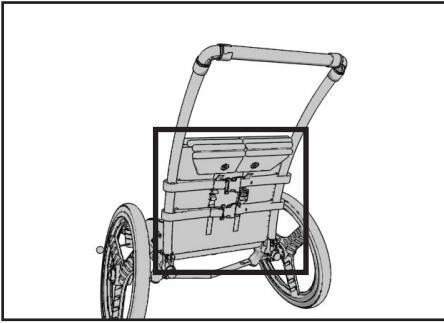


3.3 Montage der Sitzfläche

- 1 Boucler les 3 sangles horizontale (c) du dossier en positionnant la sangle supérieure du dossier à la hauteur souhaitée, puis recouvrir la sangle supérieure du dossier avec la partie haute du dossier.
- 2 Mettre en tension les 2 sangles verticales (d) du haut du dossier.
- 3 Faire passer la sangle latérale dans les passants d'un côté de la mousse assise, puis en dessous de l'assise et repasser par les passants de l'autre côté de l'assise pour venir fermer la boucle de sangle à l'arrière des 2 tubes de la barre de poussée.



Avant chaque utilisation s'assurer que les boucles soient fermées et les sangles bien tendues.

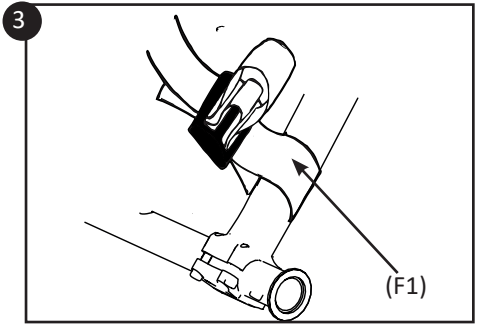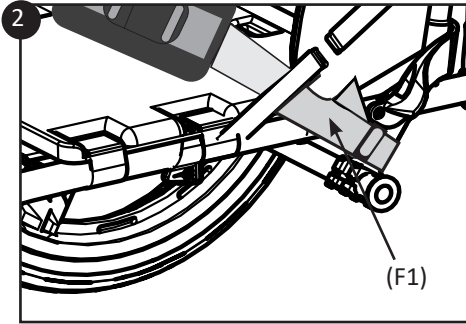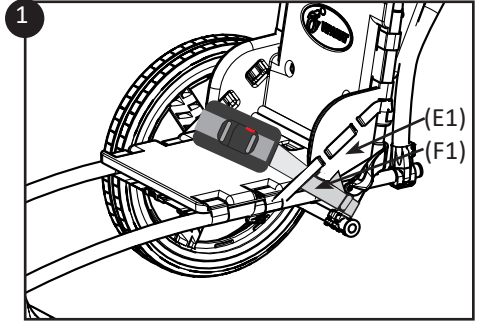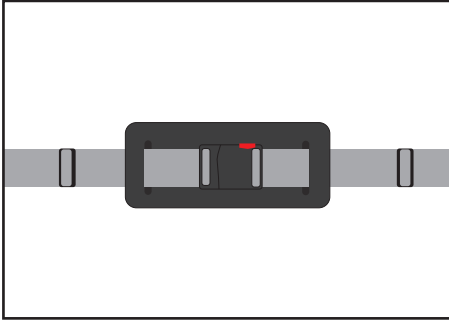


3.4 Montage der Option Bauchgurt (0024-00-01)

- ❶ Placer la ceinture sur l'assise et faire passer la sangle (F1) à l'intérieur de la partie (E1).
- ❷ Passer la sangle (F1) de façon à contourner le tube du châssis de l'extérieur vers l'intérieur.
- ❸ Faire passer à nouveau la sangle dans le passant en la faisant sortir d'au moins 2 cm puis serrer.

Vérifications:

- Vérifier que la ceinture soit solidement fixée au châssis de l'Hippocampe

Le numéro de série de la ceinture se situe sur l'étiquette sur l'emballage du produit.

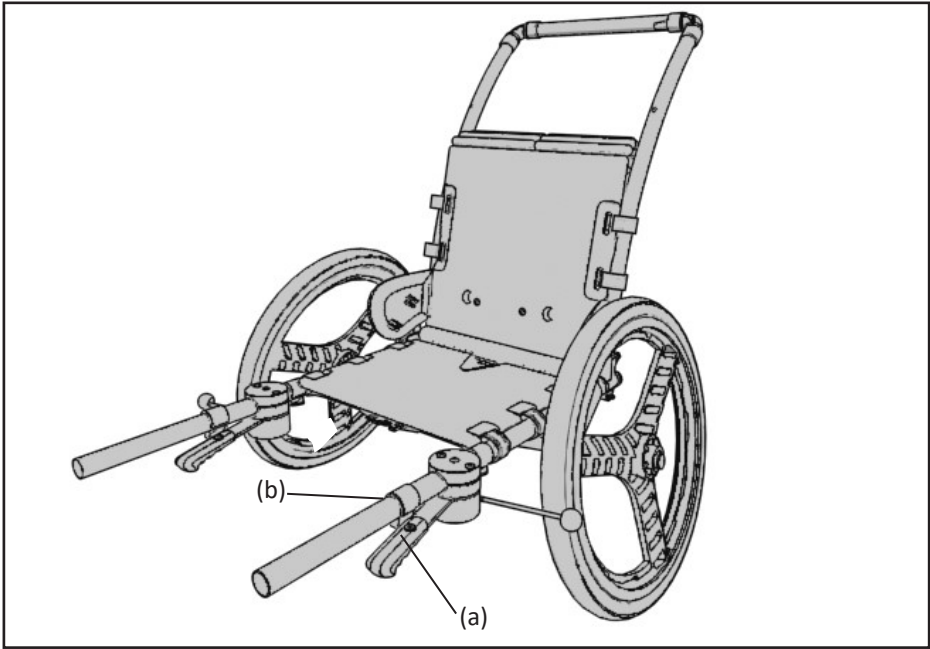

4. Tipps zur Verwendung

4.1 Verwendung von Feststellbremsen

❶ Benutzen Sie die Bremsen beim Transfer, um die Räder zu blockieren. Die Edelstahlstange sollte die Räder blockieren und die Polyethylenstange (a) sollte mit der Klemmbacke eingeklemmt werden.(b)

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Medizinischem Material (Medical Device)		Modellnummer
	Lesen Sie vor dem Gebrauch die Montageanleitung		Seriennummer
	CE-Kennzeichnung		Maximales Benutzergewicht
	Vorsicht Punkt		Datum der Herstellung
	Nicht über den Hausmüll entsorgen		Latex free : latexfrei
	Hersteller		

Kennzeichnungsschild :

Das Typenschild ist am Rahmen Ihres Rollstuhls angebracht.

Ein Musteretikett ist unten abgebildet.

	VIPAMAT (www.vipamat.com)	Made in France	
	3 rue Gustave Eiffel		
	56270 PLOEMEUR France		
	+33-297 862 487(Outside USA)	832848533(USA)	
FAUTEUIL HIPPOCAMPE PISCINE			
SWIMMING-POOL WHEELCHAIR HIPPOCAMPE			
Ref	0002-TS-02-BU	Size TS	Qt 1
SN	000000	LOT	900000
			02/07/2002
			286 Lbs
			130 Kg
(01)03664560000084(10)900000(21)000000			

UDI-Nummer (Unique Device Identifier)

Finden Sie unseren Tutorial-Kanal auf **Youtube**
und folgen Sie unseren Neuigkeiten auf **Facebook** und **Instagram**



Vipamat



Vipamat
World



Vipamat

Anmerkungen

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

Anmerkungen

A series of horizontal dashed lines providing space for notes.



DE

Hippocampe Schwimmbad



EN12-02-V2-DE*31/10/2023

DE

VIPAMAT

3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)

Tél : +33 (0)2 97 86 24 87 - Fax : +33 (0)2 97 86 73 81

www.vipamat.com - contact@vipamat.com